


Pax-i SC 拍攝程序及機器操作方式

1 預開機時，請先開啟拍攝電腦，再開Pax-i綠色電源開關。

2 開啟EasyDent，建立新病患或搜尋出欲拍攝病患的資料後，

從病患列表點選病患，按  進入拍攝模式。

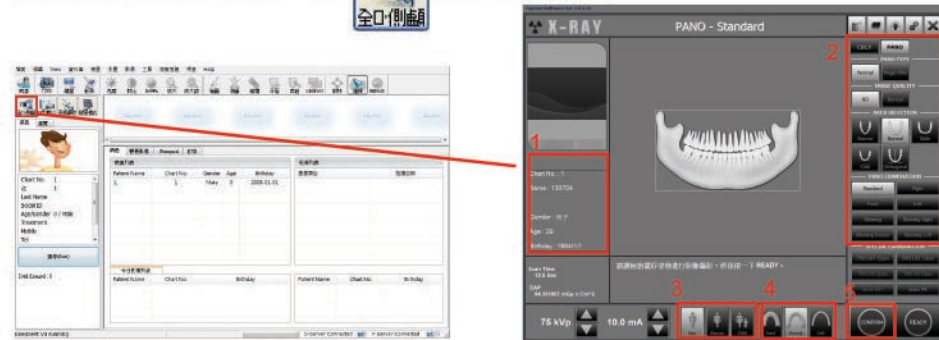

3 操作畫面設定選擇

1) 確認患者資料 (如果病患資料輸入無誤，正確的性別年紀將會自動設定)

2) 選擇拍攝模式

Standard Pano(標準全口) /
Special(特殊全口) / Right.Front.Left
One-shot Ceph(快拍側顛)

3) 設定病患性別與體型選擇

4) 選擇子拍攝模式

5) 設定完成按『Confirm』


4 定位 使用 UP / DOWN
調整適合患者的高度



5 病患定位-Panoramic

1) 請確認患者上下門牙有確實咬住咬合棒凹槽

2) 確認中心線(經過眉心、鼻頭、人中)、水平線 (經過眼窩下緣、耳洞)、犬齒線(經過犬齒中間)

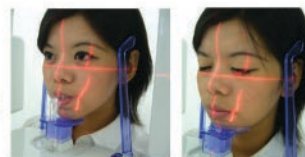

全口拍攝定位
無門牙 / 犬齒線則在嘴角

6 病患定位-Sinus

1) 將下巴支撐座換成Sinus用底座固定器

2) 頭與機身約成15度傾斜

3) 水平線調到最上面

4) 確認中心線(經過眉心、鼻頭、人中)、
犬齒線(經過眼角)



Sinus拍攝定位

7 病患定位-TMJ-Open & Close

- 1) 將下巴支撐座換成TMJ用底座固定器
- 2) 確認中心線(經過眉心、鼻頭、人中)、水平線 (經過眼窩下緣)、犬齒線(經過顴骨外圍)
- 3) 先拍張口，再拍閉口



TMJ 張口拍攝定位



TMJ 閉口拍攝定位

8 病患定位- Cephalometric

- 1) 耳桿卡入耳洞內
- 2) 雙眼直視前方(法蘭克福線平行地面)
- 3) 基準桿頂至鼻樑深處
- 4) 上下牙自然咬合(後牙區)



側顛拍攝定位

9 確認上述步驟都設定完成，按下「Ready」鍵後出現以下畫面再按下拍攝鈕



按住拍攝鈕等紅色進度表
完成後5秒再放開

10 當影像拍攝成功後，檔案會自動儲存。

11 下班關機時，請先關X光機，再關電腦。



博泰醫療器材股份有限公司 VATECH Taiwan

□ 台北總公司	11493台北市內湖區洲子街62號5樓	02-8751-1578
□ 台中分公司	40746台中市西屯區漢口路二段151號15樓2-1	
□ 高雄分公司	80458高雄市鼓山區裕誠路1093號12樓F室	