



快速入門手冊 | Ver. 2.1



快速入門手冊資訊

本文件提供關於如何使用 EzDent-i 的資訊。未經發行人書面同意，不得以任何形式複製本文件。

我們建議使用者應在操作軟體前先行細讀手冊內容以確保 EzDent-i 軟體程式操作正確。若條文有任何增刪或異動時，恕不另行通知。本手冊可能隨時增補內容，恕不另行通知。本手冊之印刷版本為隨產品附送，其內容也許不包含最新版本。有關此功能的詳情，請參見《用戶手冊》。

聯絡資訊

- 網站：<http://www.vatech.co.kr>
- 電話：+82-31-8015-6171

關於本文件

- 手冊名稱：EzDent-i 快速入門手冊
- 發佈日期：2016 年 6 月
- 手冊版本：2.1
- 相關 EzDent-i 版本：2.1
- 製造商：EWOOSOFT Co., Ltd

使用者通知

- 條文有任何增刪或異動時，恕不另行通知。
- 根據國家/地區和語言之不同，EzDent-i 的部分功能可能有所限制。
- 未經發行人書面同意，不得以任何形式複製本文件。
- 若要保持作業順暢，使用者必須閱讀並遵守下列指示來使用 EzDent-i。
- 為了擁有最佳的執行效能，使用者務必配合 EzDent-i 的系統要求。

本手冊中所使用的符號

使用前，請先熟悉本手冊中會出現的圖示與符號。下表說明每一個符號所代表的資訊類型。

	表示附註、用途密訣或其他資訊
	表示無法採取或執行可能造成問題的特定動作
	表示可能造成重要資料遺失的動作

產品資訊

Product: Dental Imaging Processing Software For X-ray System

Model : EzDent-i



Manufacturer

801-ho, Vatechnetworks Bldg.,13, Samsung 1-ro 2-gil,

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

EWOO SOFT. Co.,Ltd.

Website : www.ewoosoft.com



Chancery House, St. Nicholas Way, Sutton, SM1 1JB United Kingdom


Vatech Dental Manufacturing Ltd

MADE IN KOREA



Serial No. : Marked On The Product

Software Version : 2.1

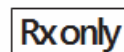

0120



Warning



Consult User
Manual

目錄

快速入門手冊資訊	1
目錄.....	3
Chapter 1. EzDent-i 基本訊息	7
1. 啟動 EzDent-i	8
Chapter 2. 患者	9
1. 「患者」選項	10
2. 患者搜尋	11
2.1 患者搜尋	11
2.2 拓展搜尋	11
2.3 檢視最近的病患清單	11
2.4 依據醫師搜索病患	12
3. 編輯病患資料	13
3.1 新患者註冊	13
3.2 修改病患資訊	13
3.3 刪除註冊的病患	13
4. 工具	14
4.1 主要工具	14
Chapter 3. 擷取	15
1. 「擷取」選項	16
2. 使用口腔外部 X 光系統擷取影像	17
3. 使用口腔內部 X 光系統擷取影像	18
3.1 口內感應器 / 口內攝影機	18
3.2 Twain	19
4. 電腦影像匯入至軟體	20
5. 工具	21
5.1 主要工具	21
Chapter 4. 檢視器	23

1.	「檢視器」選項	24
2.	影像處理	25
2.1	調整對比度和亮度	25
2.2	影像的其他處理	25
3.	變更版面	26
3.1	變更版面.....	26
3.2	設為預設版面	27
3.3	加到我的最愛	27
4.	植體模擬	28
4.1	植體模擬.....	28
4.2	依測量長度插入 Implant	29
4.3	變更插入的植體屬性	29
5.	模擬美白	30
5.1	使用 區域 套用牙齒美白	30
5.2	使用 筆刷套用牙齒美白.....	30
6.	繪製神經管	31
6.1	繪製神經管.....	31
6.2	刪除已繪製的 Canal	31
7.	校準.....	32
8.	工具.....	33
8.1	主要工具.....	33
8.2	進階工具.....	34
Chapter 5.	查閱	35
1.	「查閱」選項	36
2.	編輯購物車	37
2.1	新增查閱影像	37
2.2	購物車中 [我的最愛]	37
3.	管理類別	38
3.1	添加一個新類別	38
3.2	電腦查閱內容匯入軟體.....	38
4.	工具.....	39

4.1	主要工具	39
Chapter 6.	報告	41
1.	「報告」選項	42
2.	報告中插入文本或影像	43
2.1	插入患者影像	43
2.2	插入文字方塊	43
3.	儲存報告與傳送電子郵件	44
3.1	儲存報告	44
3.2	開啟已儲存的報告	44
3.3	電子郵件傳送報告	44
4.	工具	45
4.1	主要工具	45

Chapter 1. EzDent-i 基本訊息


1. 啟動 EzDent-i	8
----------------------	---

1. 啟動 EzDent-i

1. 按兩下桌面上的 EzDent-i 圖示，會出現啟動視窗，同時開啟 EzDent-i。




2. EzDent-i 隨即開啟並出現第一個畫面。

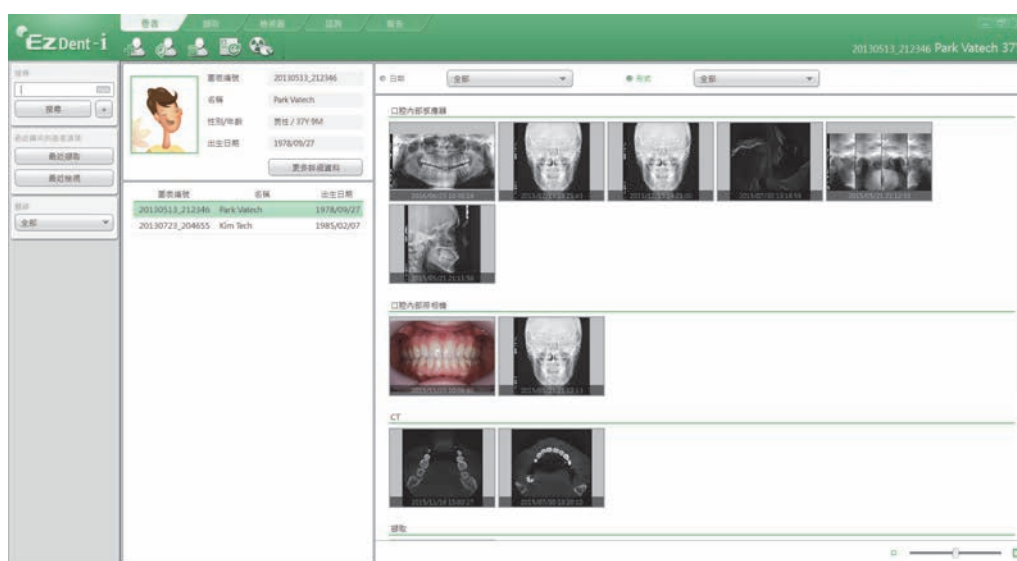

Chapter 2. 患者

1. 「患者」選項	10
2. 患者搜尋	11
3. 編輯病患資料	13
4. 工具	14

1. 「患者」 選項

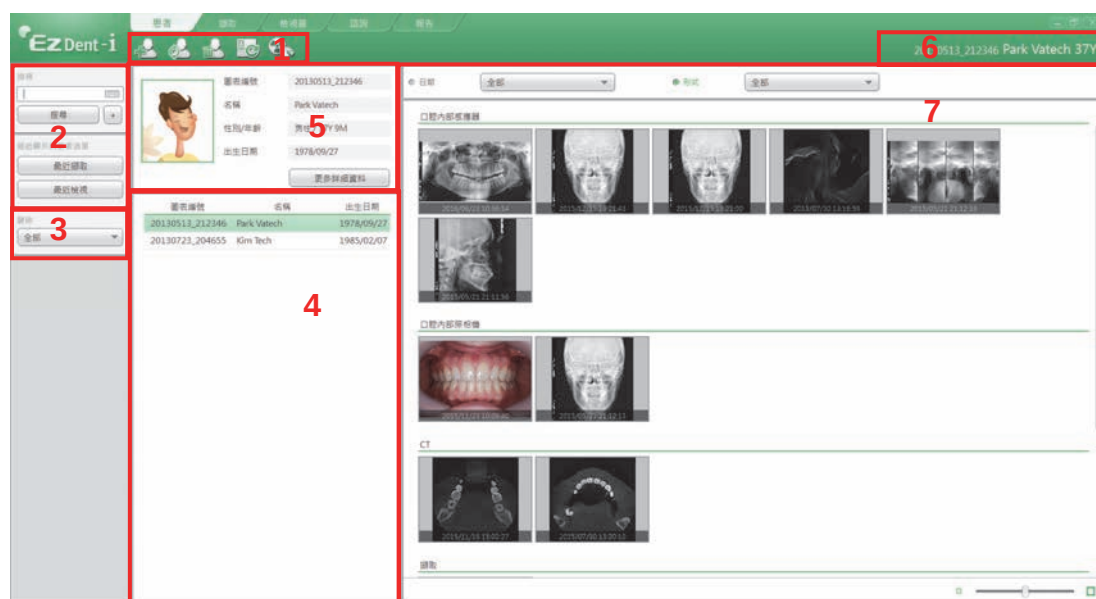

- 1：添加、修改和刪除病患資訊的工具列。
- 2：這個窗格可用來依照擷取日期或搜尋日期來搜尋或排序病患。
- 3：登錄患者時、會列出指定給目前醫師選取的病患。
- 4：顯示搜索病患結果。
- 5：顯示所選病患的詳細資料。
- 6：顯示所選病患的病歷號碼、姓名及年齡。
- 7：所選病患的資訊。



NOTE

使用者可透過檢視器視窗右下方的縮圖滑桿來調整選取之影像的大小。



將滑桿向左移可以縮小影像大小，您可在畫面上看到更多影像。

2. 患者搜尋

2.1 患者搜尋

1. 在病患搜尋視窗中輸入病患的姓名與病歷號碼，然後按一下 [搜尋] 按鈕或按下 Enter 鍵。隨即顯示搜尋結果。
2. 按一下搜尋結果清單中的病患，以檢視該病患的詳細資訊。

2.2 拓展搜尋

詳細搜尋可透過組合依影像模式與依日期搜尋使搜尋結果更完整。

1. 按一下 [搜尋] 按鈕右邊的 [+] 按鈕，就會出現 [搜尋患者] 視窗。
2. 選擇所需的搜尋條件，然後按一下 [搜尋] 按鈕，隨即出現符合搜尋條件的結果。



2.3 檢視最近的病患清單


您可依照擷取日期或檢視器標籤中的檢視日期來排序病患清單。



- 最近拍攝的影像：依擷取日期列出病患。
- 最近檢視的影像：依檢視器標籤中的檢視日期列出病患。

2.4 依據醫師搜索病患

選取醫師姓名時，會分類並列出指定給選取醫師的病患。

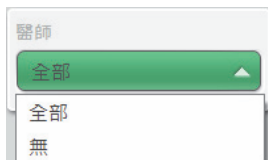

- 全部：列出所有登錄的病患。
- 特定醫師：列出指定給選取醫師的病患。
- 無：列出未指定給任何醫師的病患。



- 使用者可在 [設定 > 環境 > 一般 > 使用者帳戶管理員] 新增、修改或刪除醫師清單。如需管理使用者帳戶的詳細資訊，請參閱「第 2 章 設定 EzDenti-I > 2.2.2.4. 使用者帳戶管理員」。
- 僅會在醫師清單上顯示使用該醫師帳戶建立的醫師姓名。

3. 編輯病患資料

3.1 新患者註冊

1. 按一下工具列上的 [新增患者] 按鈕，會出現 [新增患者] 視窗。



2. 在新增病患視窗中輸入病患資訊，然後按一下 [新增] 按鈕。
如需有關手動輸入病歷號碼或電子郵件設定的資訊，可在「2. 使用者手冊中的設定 EzDent-i」找到。

3.2 修改病患資訊

按一下工具列上的 [修改] 按鈕，會出現 [更改病人] 視窗。



3.3 刪除註冊的病患

按一下工具列上的 [刪除] 按鈕，會出現 [更改病人] 視窗。輸入密碼即可刪除病患記錄。



EzDent-i 的預設密碼為 '0000'。

使用者可在 [設定 > 環境 > 一般 > 使用者帳戶管理器] 中變更密碼。

4. 工具


4.1 主要工具

圖示	名稱	功能說明
	新增	新增病患。
	修改	修改註冊之病患的資訊或影像。
	刪除	刪除註冊的病患。
	隱藏顯示的患者資訊	重設搜尋結果與隱藏影像。
	匯出擷取資訊	將擷取的資訊匯出為 Excel 檔案。

Chapter 3. 擷取

1. 「擷取」選項	16
2. 使用口腔外部 X 光系統擷取影像	17
3. 使用口腔內部 X 光系統擷取影像	18
4. 電腦影像匯入至軟體	20
5. 工具	21

1. 「擷取」 選項

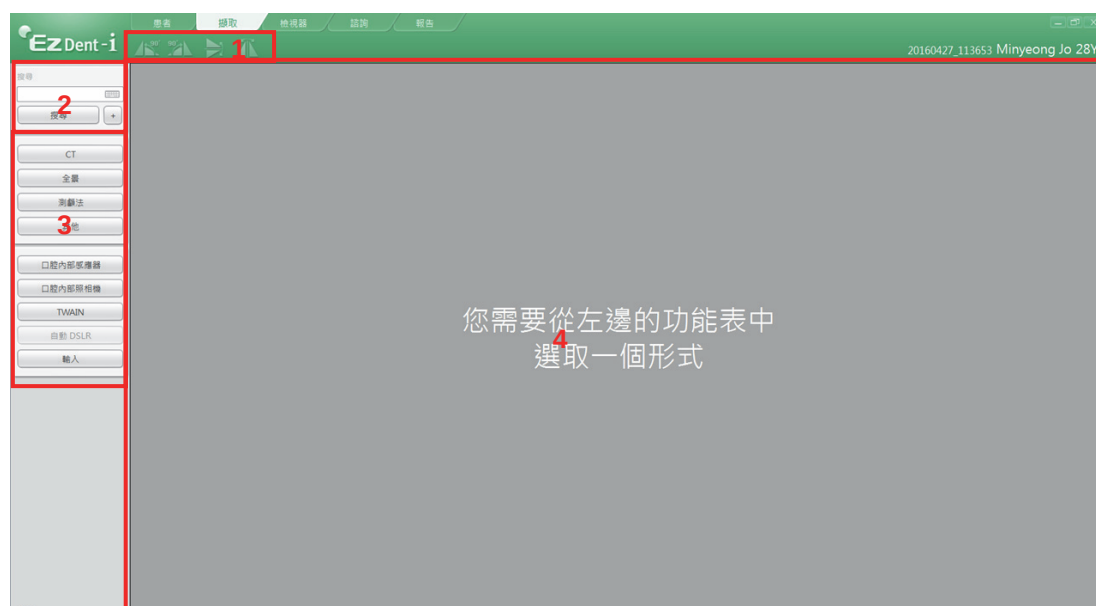


- 1：用於擷取影像的/下/左/右旋轉。
- 2：

這個窗格可以用來搜尋病患。不管使用者在哪一個標籤下作業，這個窗格都會固定不動，以便使用者隨時搜尋另一名病患。
- 3：使用者可以選擇形式與匯入或儲存影像的形式。
- 4：儲存前，使用者可預覽擷取的影像。

2. 使用口腔外部 X 光系統擷取影像

1. 選取想使用的口腔外部 X 光系統的類型。然後出現擷取影像的影像擷取程式。

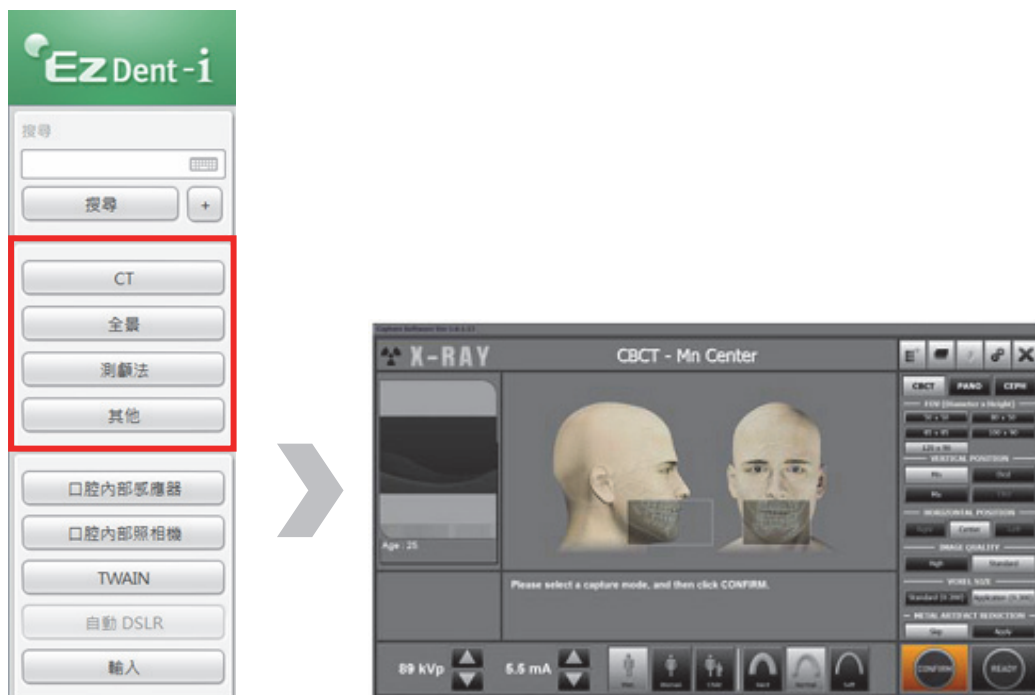

2. 在影像擷取程式設定曝光模式後，按一下 [確認] 按鈕。
3. 按一下 [READY] 按鈕並使用曝射開關拍攝影像。畫面上隨即出現拍攝的影像。




Vatech 製造的最新設備，在擷取影像時，使用影像擷取程式。可在 Vatech 設備手冊參考使用者指示和影像擷取程式相關資訊。


3. 使用口腔內部 X 光系統擷取影像

3.1 口內感應器 / 口內攝影機

1. 按一下連接口內感應器、口內攝影機或 Twain 時要使用的形式，畫面上會出現牙位

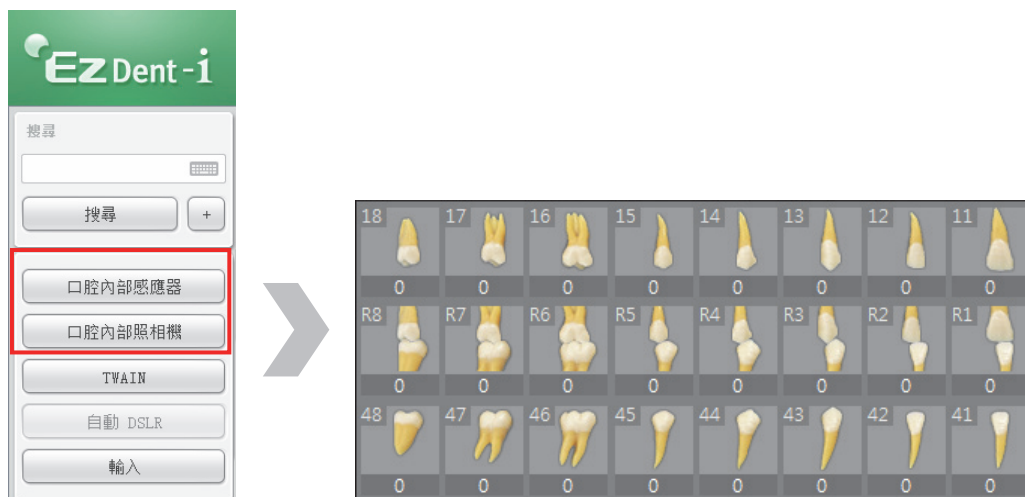

2. 選擇擷取之影像的版面位置。按一下 [變更版面] 按鈕，隨即出現 [變更版面] 視窗。選擇想要使用的版面。

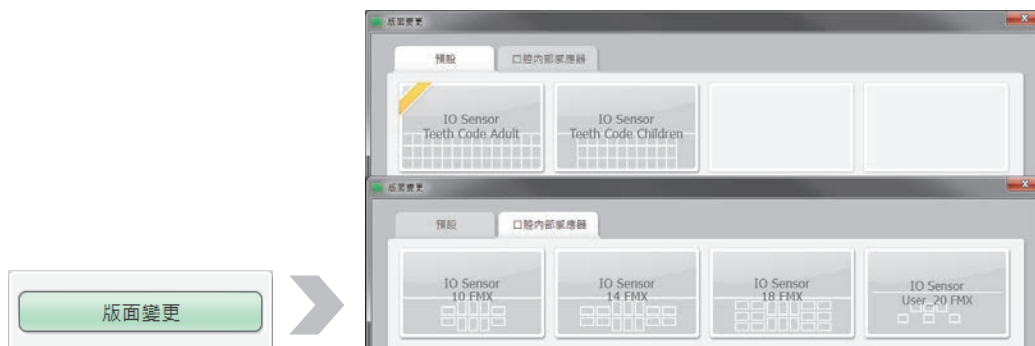

3. 將病患帶至定位後按一下 [就緒] 按鈕。
如果口內感應器、口內攝影機等設備已確實接受，就會啟動影像擷取模式。




4. 使用曝射開關拍攝 X 光照片，隨即將會拍攝影像。
如果使用者有口內攝影機，請按下擷取開關。即可完成影像的拍攝了。
5. 從縮圖中選擇影像，然後按一下 [儲存至資料庫] 按鈕，擷取的影像就會被儲存到資料庫中。

3.2 Twain

Twain 是一種連接影像擷取軟體與影像擷取裝置（掃描器或數位相機）的標準影像擷取驅動程式。針對所有支援 Twain 的影像擷取裝置，都可以透過 EzDent-i 擷取影像。

1. 按一下 [TWAIN] 按鈕，畫面將會變更為 TWAIN 擷取模式。

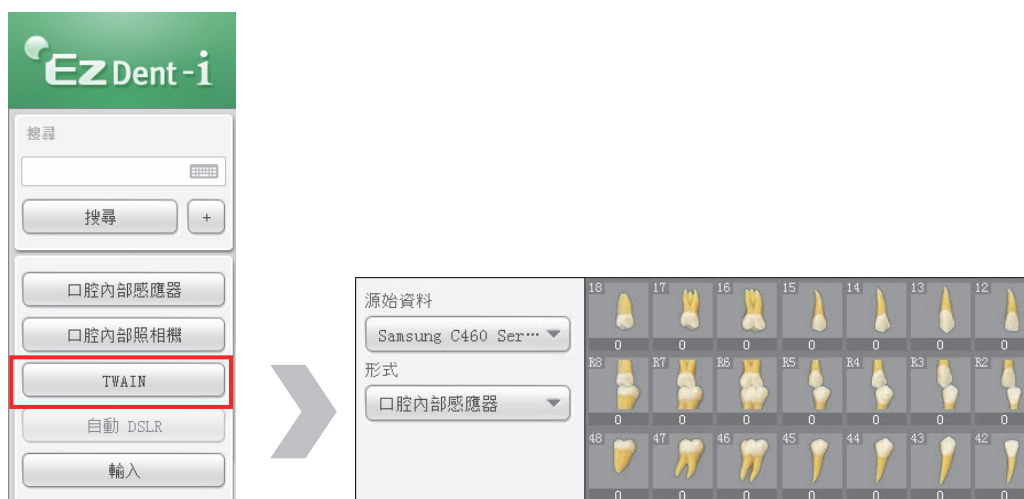

2. 按一下 [原始資料] 和 [形式] 下拉式功能表並選擇來源和設備類型。
3. 按一下 [擷取] 按鈕。




4. 縮圖清單中會出現擷取的影像。
5. 按一下縮圖來選取擷取的影像，然後將它們儲存到 EzDent-i 伺服器。選擇影像後，按一下 [儲存至 DB] 按鈕。
6. 接著會出現一個快顯視窗通知使用者擷取的影像已成功儲存到資料庫中。


4. 電腦影像匯入至軟體

儲存在本機 PC 的擷取影像會匯入與儲存至 EzDent-i 對應的病患資料中。

1. 點擊「匯入」。選擇設備類型。

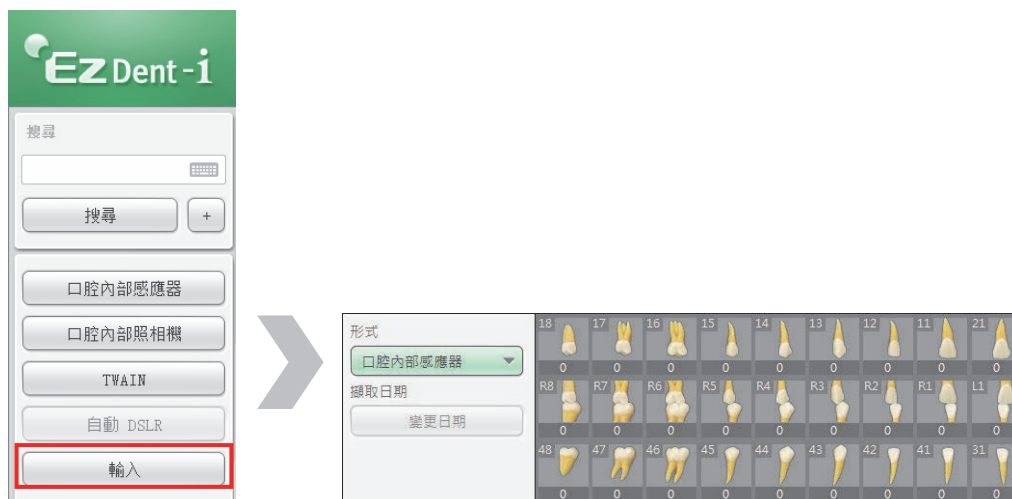


2. 按一下 [檔案匯入] 按鈕，然後選擇要匯入的影像。隨即出現 [開啟] 視窗。
3. 選擇所有要匯入的影像，然後按一下 [開啟] 按鈕。如果使用者想選擇的影像超過 2 張，請按住鍵盤上的 <Ctrl> 鍵，然後選擇所需的影像。
4. 完成後，縮圖幻燈片上就會顯示匯入的影像。

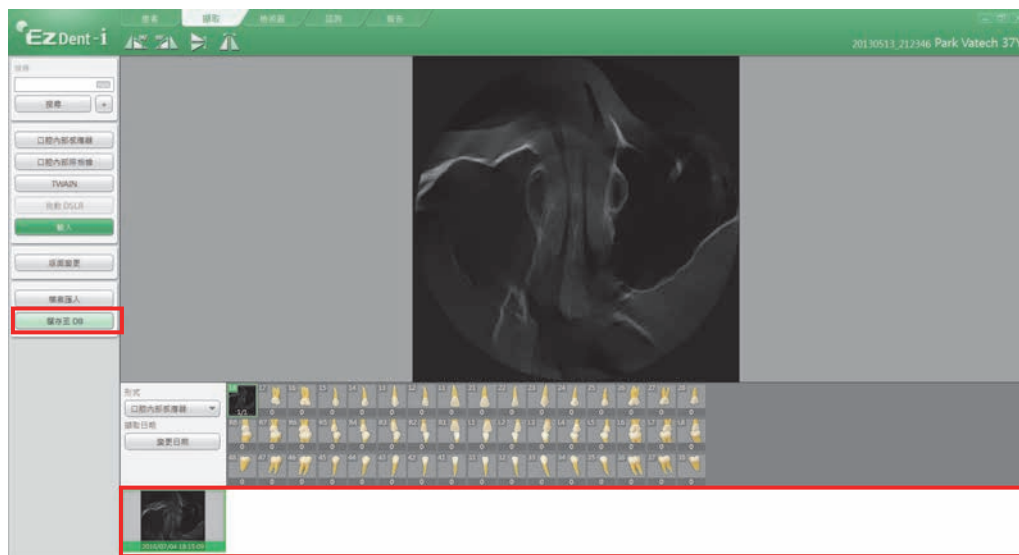

5. 按一下所需的縮圖影像加以選擇並儲存至 EzDent-i 伺服器。按一下 [儲存至 DB] 按鈕以將影像儲存到資料庫中。

5. 工具


5.1 主要工具

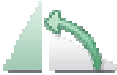圖示	名稱	功能說明
	90° CCW	逆時針旋轉 90 度
	90° CW	順時針旋轉 90 度
	垂直翻轉	垂直翻轉影像
	水平翻轉	水平翻轉影像
	變更影像方向後，再按一下 [儲存至 DB] 按鈕，將調整過新方向的影像儲存到資料庫中。	

Chapter 4. 檢視器

1. 「檢視器」選項	24
2. 影像處理	25
3. 變更版面	26
4. 植體模擬	28
5. 模擬美白	30
6. 繪製神經管	31
7. 校準	32
8. 工具	33

1. 「檢視器」 選項

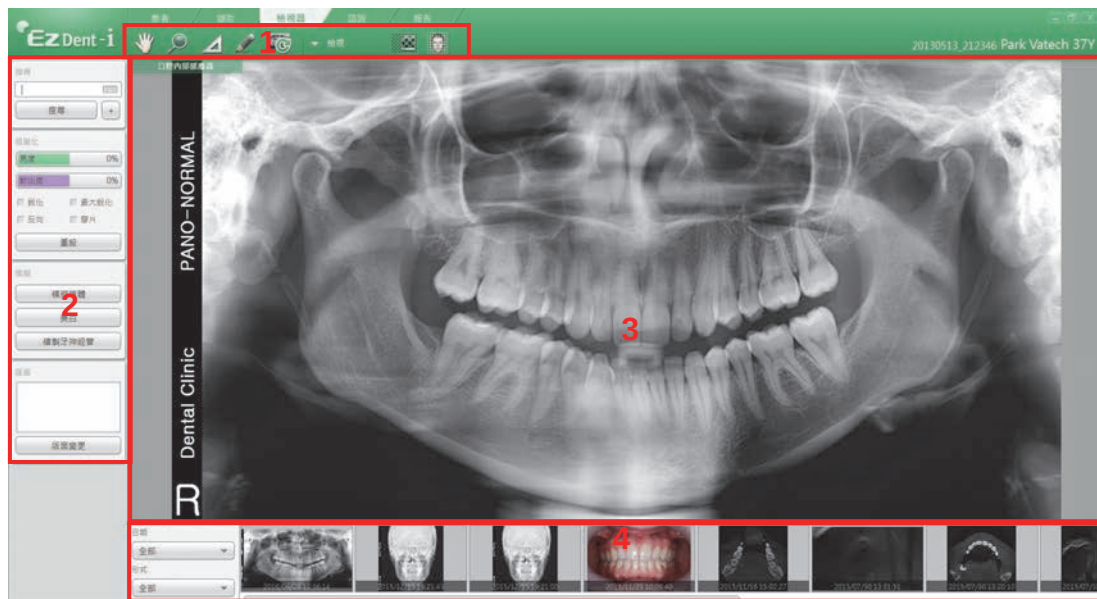

- 1：這些按鈕可用來測量、縮放與移動影像。
- 2：這個窗格可以用來將影像視窗化與執行模擬。
- 3：顯示影像清單中所選影像的工作區。
- 4：此窗格顯示縮圖中選取病患的影像。

2. 影像處理

2.1 調整對比度和亮度

透過拖曳滑鼠右鍵至上/下/左/右，或用對比度滑桿調整影像的對比度和亮度。



2.2 影像的其他處理

您可透過在視窗化上選擇項目來控制影像。



3. 變更版面


可分割工作區，在螢幕上顯示兩個以上影像。所分割工作區的格式在 EzDent-i 上稱為配置。

3.1 變更版面

1. 點擊「版面變更」。[版面變更] 視窗隨即出現。



2. 按兩下想要的版面或選取然後按一下 [確定] 按鈕。選取的版面會在工作區顯示。
3. 拖曳影像檢視畫面中的縮圖影像。

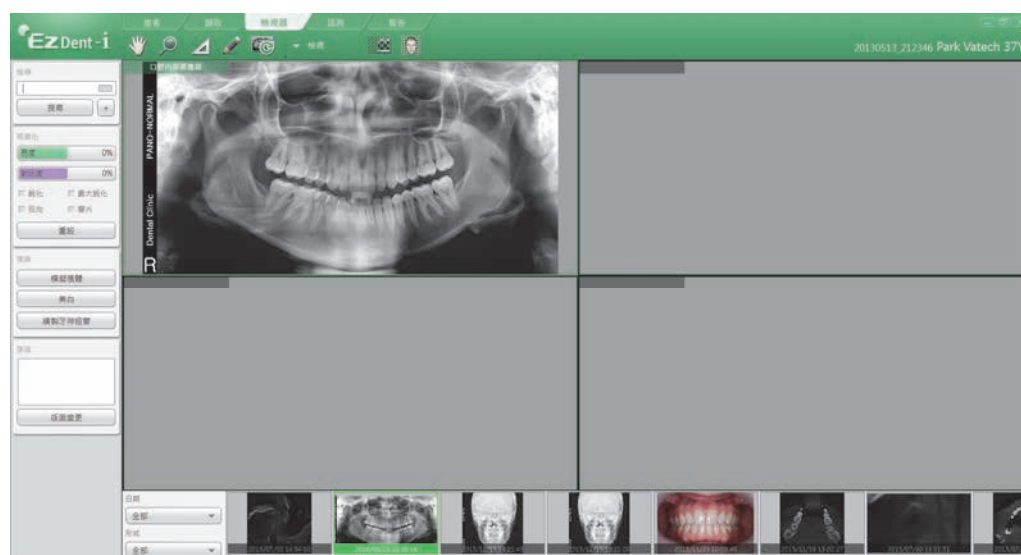

3.2 設為預設版面

1. 點擊「版面變更」。[版面變更] 視窗隨即出現。
2. 選擇所需的版面，按右鍵點選 [設為預設] 選項。




3. 按一下 [確定] 按鈕，工作空間中會出現所選的版面。
4. 拖曳影像檢視畫面中的縮圖影像。

3.3 加到我的最愛

1. 點擊「版面變更」。[版面變更] 視窗隨即出現。
2. 按一下選擇一個版面，在該版面上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [加到我的最愛] 選項。



3. 選取的版面上會出現星號，按一下 [確定] 按鈕。選取的版面就會新到控制面板的版面清單中。

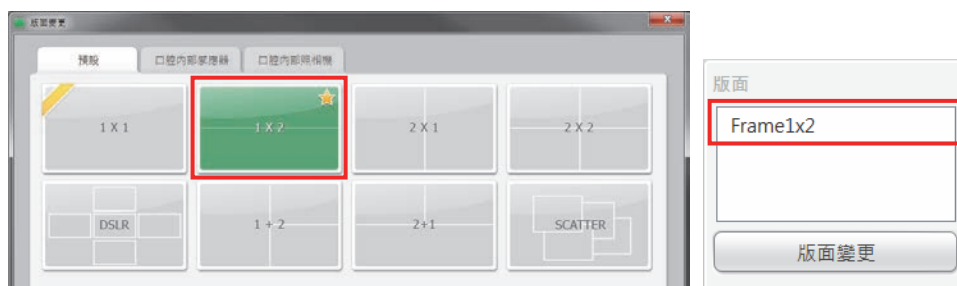

4. 植體模擬


4.1 植體模擬

1. 點擊「插入 Implant」，出現「IMPLANT 管理員」視窗。
2. 在「IMPLANT 管理員」視窗上選擇插入植體的牙齒編號和資訊。



- 如需模擬牙冠，請按一下並勾選 [牙冠模擬] 選項的核取方塊。
- 按一下 [設定] 按鈕，變更每個牙齒編號的預設植體。

3. 點擊「確定」。

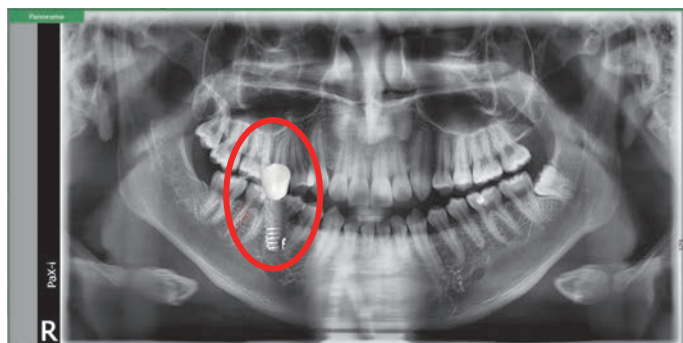

4.2 依測量長度插入 Implant

1. 從工具列中選擇「長度」工具。
2. 點擊牙齒的影像的兩點測量長度。
3. 再次點擊「長度」，取消選擇。



4. 選擇所繪製的線，然後在線上點擊滑鼠右鍵。從列表清單中選擇「模擬植體」。植體將自動插入。



可從每一顆牙齒的植體清單選取的植體選項都可在 [設定 > 模擬 > 預設 Implant] 中設定。

4.3 變更插入的植體屬性

1. 在 2D 影像上點擊想要更改其屬性的 植體。
2. 點擊滑鼠右鍵，並從清單中選擇 [屬性]。




3. 從 [IMPLANT 管理員] 中根據需要變更資料，並點擊 [確認]。

5. 模擬美白

5.1 使用 區域 套用牙齒美白


1. 選擇 [區域] 按鈕並找出區域上的方塊，以套用美白效果。調整美白方塊的大小。

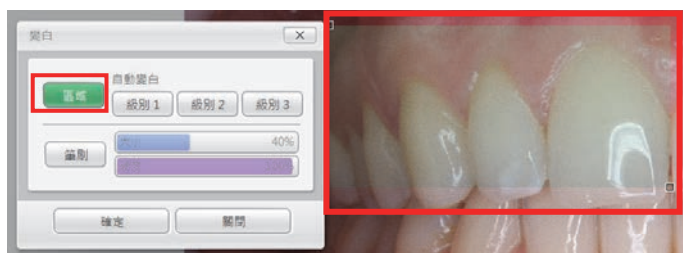

2. 視所需美白效果的程度選擇 [級別 1]、[級別 2] 或 [級別 3]。
3. 按一下 [確定] 按鈕儲存變更。

5.2 使用 筆刷 套用牙齒美白

1. 按一下 [筆刷] 按鈕以向左右移動捲軸，並調整美白刷的大小及強度。

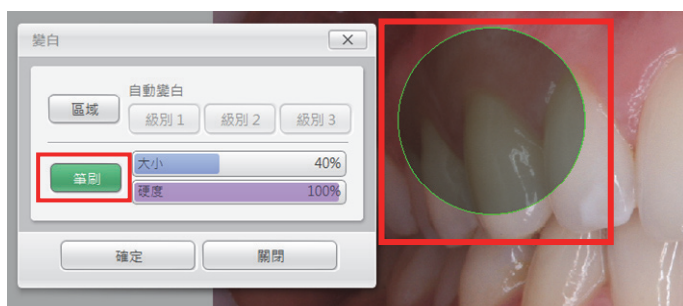


2. 在區域上按一下並拖曳滑鼠以套用美白效果。
3. 按一下 [確定] 按鈕儲存變更。

6. 繪製神經管

6.1 繪製神經管

1. 按一下工具列上的 [長度] 圖示並校正影像。
2. 按一下 [繪製牙神經管] 按鈕。
3. 按一下以沿下顎神經繪製點。

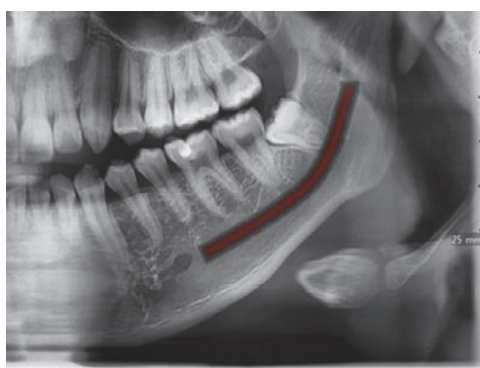

4. 若要刪除先前繪製的點，請按一下右鍵。
5. 雙擊以完成繪製 Canal。



您可透過在 Canal 上點擊滑鼠右鍵來變更已放置 Canal 的屬性。


6.2 刪除已繪製的 Canal

1. 選擇 canal，然後在 Canal 上點擊滑鼠右鍵。
2. 從清單中點擊 [刪除] 以刪除所選 Canal。

7. 校準

影像校準可讓使用者手動輸入準確的長度。

1. 以滑鼠右鍵點選工作空間並從清單選擇 [影像編輯] 選擇。
2. 在 [影像編輯] 視窗中，選擇工具列上的 [長度] 工具，然後畫一條線。

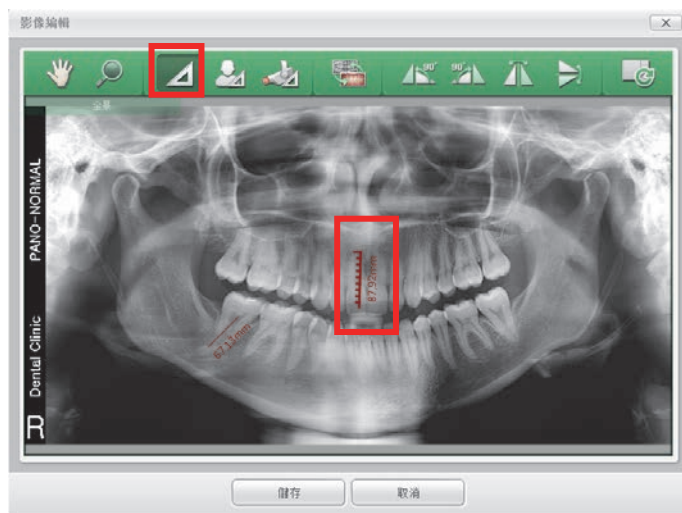

3. 按一下 [影像編輯] 視窗中的 [使用者校準] 圖示，會出現 [使用者校準] 視窗。輸入牙齒的實際長度，然後按一下 [確定] 按鈕。



使用者可以輕鬆使用 [使用成像設備校正長度] 功能所提供的校準預設來輸入校準值。

8. 工具

8.1 主要工具

圖示	名稱	功能說明
	移動	移動影像
	縮放	放大或縮小
	長度	測量兩點之間的距離。
	自由繪製	自由拖曳
	重設檢視	重設移動和縮放


8.2 進階工具

類別	圖示	名稱	功能說明
檢視		放大鏡	放大所選區域並套用對比。
		打開/關閉網格	在影像上顯示格線以檢查病患是否有不對稱情況。
度量		多個長度	測量兩點以上的長度。
		角度	測量某一點的角度。
		剖面	測量所需區域的骨骼密度。
註解		備忘錄	在某一點插入備忘錄。
		線條	拖動滑鼠在所需區域畫一條線。
		矩形	拖動滑鼠在所需區域畫一個長方向。
		橢圓形	拖動滑鼠在所需區域畫一個橢圓形。
擷取		區域擷取	擷取所選區域的影像，擷取的影像會儲存到資料庫中。
		已選擇視窗擷取	擷取目前影像，擷取的影像會儲存到資料庫中。
		擷取視圖框	擷取工作空間並儲存到資料庫中。
		發送到報表	直接將工作空間影像傳送到報告。
ETC		打開/關閉重疊	顯示/隱藏所有顯示的物件。
		全部重設	刪除所有套用的工具效果。

Chapter 5. 查閱

1. 「查閱」選項	36
2. 編輯購物車	37
3. 管理類別	38
4. 工具	39

1. 「查閱」 選項

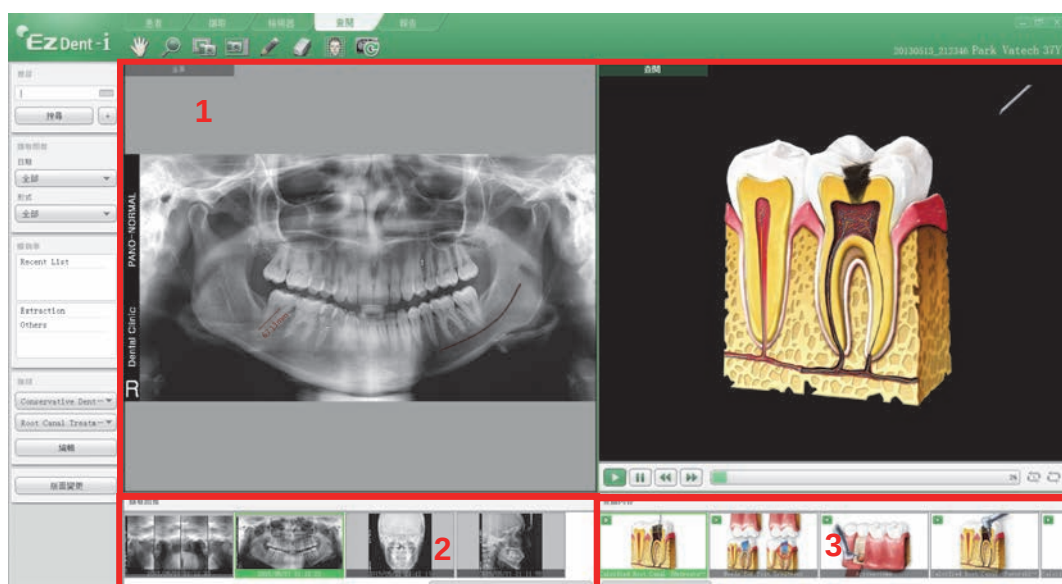

- 1：查閱的內容會在這個窗格中顯示或播放。使用者可以從縮圖拖曳必要的內容。
- 2：此窗格顯示縮圖中選取病患的影像。
- 3：查閱的內容會顯示在這個窗格中。它會顯示查閱之病患的動態內容或影像清單。



NOTE

- 使用者的 PC 作業系統若是 Windows 7 版本且未安裝 Media Player，就不會播放查閱影片。
- 在 Windows Vista 環境中，無法播放查閱影片。



NOTE

- 我的最愛(Favorites)
「我的最愛」購物車包含使用者選擇作為「我的最愛」的查閱內容。
- 最近使用清單(Recent List)
「最近使用清單」購物車包含最近使用的 20 條查閱內容。


2. 編輯購物車

2.1 新增查閱影像

1. 在 [擷取] 視窗中的影像上按一下滑鼠右鍵，接著按一下 [新增查閱影像] 選項，隨即會出現 [諮詢編輯器] 對話框。
2. 按一下要新增之影像的歸類類別，或按一下 [創建] 按鈕來建立新類別。
3. 按一下 [確定] 按鈕，影像就會新增到所選的類別中。

2.2 購物車中 [我的最愛]

1. 在執行狀態下的查閱內容上點擊滑鼠右鍵，然後選擇 [新增我的最愛]。

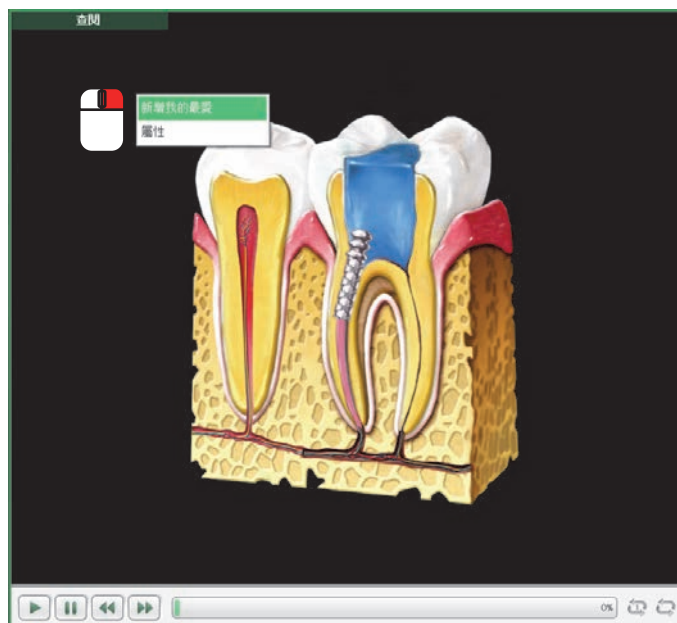


2. 當使用者從購物車功能表選擇 [我的最愛] 購物車時，新增到我的最愛的查閱動畫會以縮圖顯示。

3. 管理類別

3.1 添加一個新類別

1. 在類別中點擊「編輯」，會顯示查閱類別視窗。

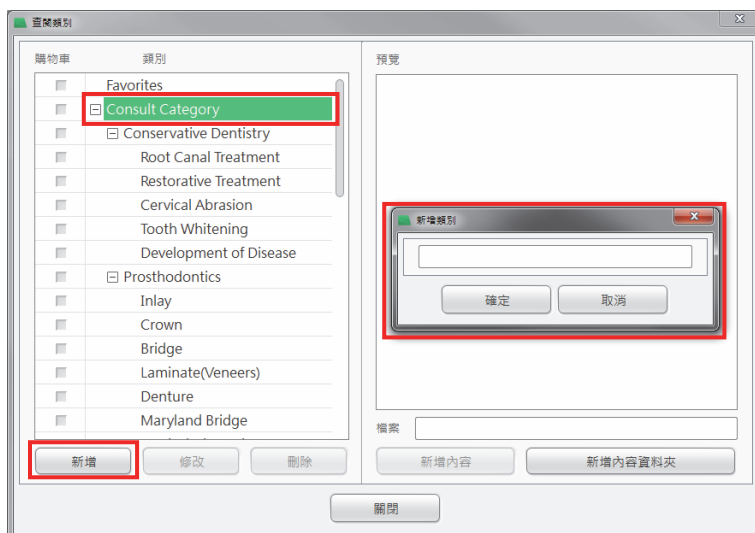

2. 選擇所要添加類別的上一類別。
3. 點擊「添加」。
4. 輸入類別名稱後，點擊「確定」。
5. 會出現所添加的類別。



修改或刪除現有類別時，按一下「查閱類別」視窗底部的 [修改] 或 [刪除] 按鈕。

3.2 電腦查閱內容匯入軟體

1. 選擇所要添加類別的上一類別。
2. 點擊「新增內容資料夾」。
3. 選擇要添加的資料夾後，點擊「選擇資料夾」。
4. 會在所選上一類別下建立具有臨時名稱的新類別。



使用者可以將 PC 中保存的圖像或動畫內容 (jpg、bmp、png、avi、wmv) 或文檔類型的内容 (doc、docx、ppt、pptx、pdf) 添加到類別中。

4. 工具


4.1 主要工具

圖示	名稱	功能說明
	移動	移動影像
	縮放	放大或縮小
	區域擷取	擷取所選區域的影像，擷取的影像會儲存到資料庫中。
	已選擇視窗擷取	擷取目前影像，擷取的影像會儲存到資料庫中。
	指標	隨意繪製線條 (* 不會儲存以指標繪製的線條)
	橡皮擦	刪除重疊影像
	打開/關閉網格	在影像上顯示格線以檢查病患是否有不對稱情況。
	重設檢視	重設移動和縮放

Chapter 6. 報告

1. 「報告」選項	42
2. 報告中插入文本或影像	43
3. 儲存報告與傳送電子郵件	44
4. 工具	45

1. 「報告」 選項

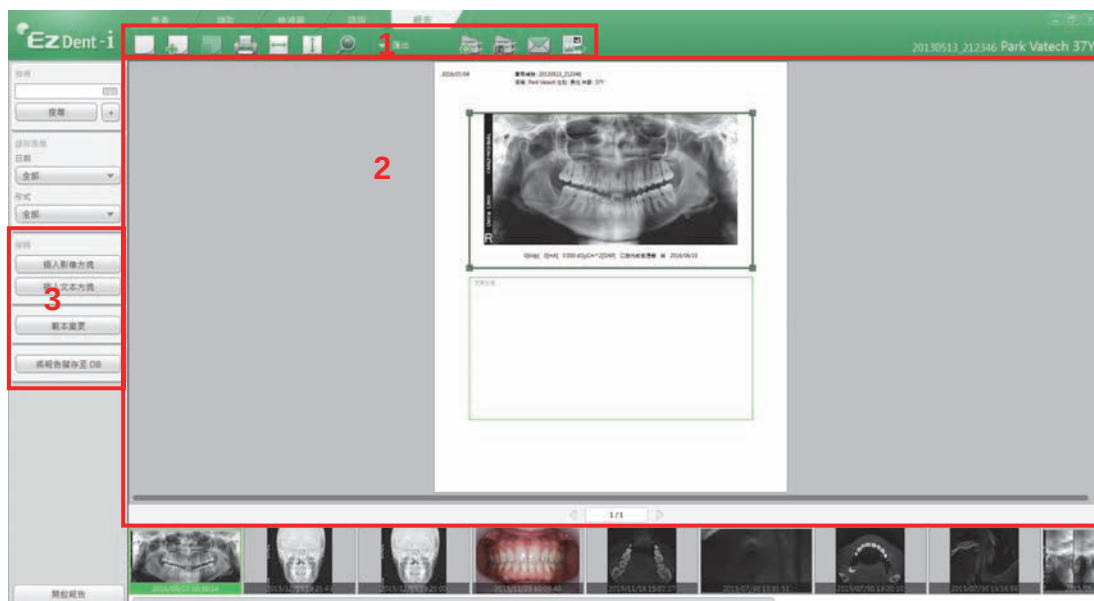


- 1：這些按鈕可用來建立或匯出報告。
- 2：使用者可製作報告並插入影像或文字。
- 3：此窗格含有插入影像和文字或儲存報告的按鈕。

2. 報告中插入文本或影像

2.1 插入患者影像

1. 點擊 [插入影像方塊] 後，在報告中出現可插入影像的新框。
2. 您可將縮圖中的影像拖放至新的影像框中。

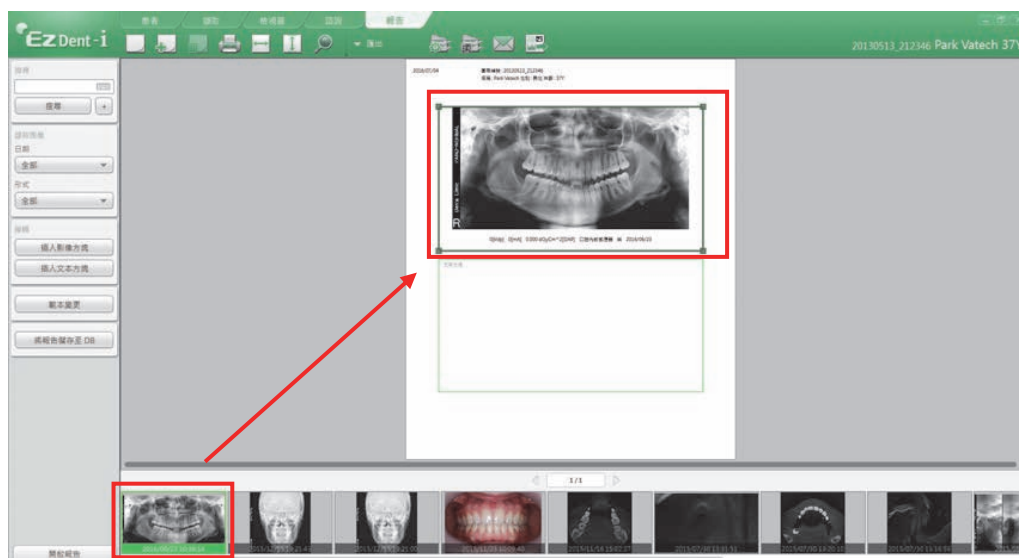

使用者可查看實際大小的影像或調整為符合視窗大小的影像。如需實際大小，影像必須含有校正數值。

- **適合影像框：**會放大影像來適合影像框大小。
- **實際大小：**會忽略框大小而顯示影像的實際大小。

2.2 插入文字方塊

1. 點擊 [插入文本方塊] 後，在報告中出現可插入文本的新框。
2. 可透過點擊兩下新的文字框插入文字。

3. 儲存報告與傳送電子郵件

3.1 儲存報告

1. 點擊 [將報告儲存至 DB]，會出現儲存報告視窗。
2. 輸入註解，然後點擊 [儲存] 儲存當前報告。

3.2 開啟已儲存的報告

1. 點擊 [開啟報告]，會出現已儲存報告的清單。
2. 從清單中選擇所需報告，然後點擊 [開啟]。

3.3 電子郵件傳送報告

1. 在報告開啟時，點擊 [傳送電子郵件]。
2. 會出現傳送電子郵件視窗，會附帶報告中使用的影像以及自動轉換的 PDF 檔案。
輸入電子郵件資訊，然後點擊 [傳送]。



若要設定傳送者資訊，請按一下 EzDent-i 的主功能表按鈕，然後按一下 [設定 > 環境 > 電子郵件] 標籤再輸入資訊。

4. 工具

4.1 主要工具

圖示	名稱	功能說明
	新增報告	刪除目前的報告與建立新報告。
	頁面新增	新增一頁
	頁面刪除	刪除一頁
	列印	列印
	水平適合	讓報告對齊水平座標軸
	垂直適合	讓報告對齊垂直座標軸
	縮放	放大或縮小
	列印設定	設定列印
	DICOM 列印	列印為 DICOM 檔
	傳送電子郵件	傳送電子郵件
	匯出為 PDF	匯出 PDF 檔
	打開/關閉重疊	顯示/隱藏所有顯示的物件。

Copyright © 2016 by Ewoosoft Co., Ltd.

文件、商標和軟體版權所有，並保留所有權利。 請參閱最終使用者授權協議中關於產品使用的協議的條款和條件。
這會在產品安裝過程中顯示在螢幕上。

未經發行人書面同意，不得以任何形式複製本文件。產品隨附的手冊可能不包括針對產品最新版本的内容。



 **EZ Dent-i**

vatech 